



パットナムバランスクッションをお買い上げ賜り、誠に有難うございます。
パットナム社は有名なロンドンタクシーの運転手さん用のカーシート開発で成功、現在は整体枕やクッションのトップメーカーとして、多くの方々に愛用されている整体用品を製造しております。

パットナム バランスクッション 使用説明書

※取扱説明書は大切に保管して下さい。

<椅子での使用>

事務椅子など色々な椅子の上に置くだけで、自然に背骨が真っすぐとなり、上体が起き、良い姿勢になります。

パットナムバランスクッションの低い部分が前方、高い部分が後方の位置に来よう椅子の座面に置いて下さい。お尻が前方へ押し出され、その結果、自然に状態が起こされ背骨が真っすぐになり、良い姿勢になります(図-1)。

図-1



<床での使用>

座布団の代わりに使用

- 座布団の代わりにパットナム バランス クッションをたたみやじゅうたんの上に敷いて下さい。
- 普通にあぐらをかかれると、通常背中が前方に丸まった姿勢となり、背骨が曲がってしまいますが、パットナム バランスクッションを座布団の代わりに敷くと、お尻の部分を中心として重心が安定しますから、あぐらをかいた状態でも背骨が真っすぐ、良い姿勢となり、長時間あぐらをかいて座っても姿勢が崩れず、疲れにくくなります(図-2)。
- 正座される時も、座布団の代わりにパットナム バランスクッションを敷かれると、お尻が前方へ押し出され、その結果、自然に状態が起こされ、背骨が真っすぐになり、良い姿勢がとれます。

図-2



図-3



座布団や平たいクッションと併用

- 座布団などの上に バランスクッションを置いてご使用頂いても上記と同様の効果がありますが、厚みのある座布団やクッションの上に バランスクッションを置かれますと不安定になりますので、ご注意ください。

正座される時の特別な使い方

- パットナム バランス クッション を正座される際、お尻と足の間にはさんでお座り下さい(図-3)。特に座布団を敷き、正座をした際に、バランスクッションをお尻と足の間にはさんでお座り頂くと、正しい姿勢で座れますし、長時間座っても足の甲の負担を和らげます。

その他・ご注意

- パットナム バランス クッションの中央は円すい形の凹みがあり、痔疾の方や妊娠されている女性のお尻にやさしい構造です。
- クッション本体は洗えませんが、カバーは取り外して、ぬるま湯手洗いでできます。
- 高温になる機器の側に置いたり、直射日光に長時間当てないで下さい。

保証規程<持込修理>

- 商品の欠陥や、正しく使用・洗濯したにもかかわらず破損した時は、無償で修理又は交換させていただきます。お買い上げ時のレシートと本保証書をご用意の上、当社宛ご連絡下さい。提示なき場合は保証致しかねます。
- 保証期間は、お買い上げ日より2年間とします。
- ご自分で修理又は改造された時、規程の洗濯方法や注意事項をお守り頂けなかった場合は、保証致しかねますのでご注意ください。
- ご購入後、2週間以内の初期不良を除き、修理・交換などに付きましては、下記輸入販売元にお持込頂くか、お客様の送料負担でお送り頂く持込み修理となります。

仕様

- サイズ(約) / 通常タイプ: 奥行40×幅37×高さ2~13cm
- 素材 / 内装材: ポリウレタン、外装材: ポリエステル・ポリウレタン

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタゴの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

英国パットナム社 日本総代理店・輸入総発売元



東京都港区東麻布 1-17-9
TEL 03-3589-3300 info@metex.co.jp
FAX 03-3589-5500 www.metex.co.jp/

お客様相談センター：03-3589-4555
(土曜、日曜、祝祭日及び正月期間を除く平日9:00~17:30)