


取扱説明書

耳あな型補聴器 PHA-C11

PION0005 PHA 13 1304B-13041200

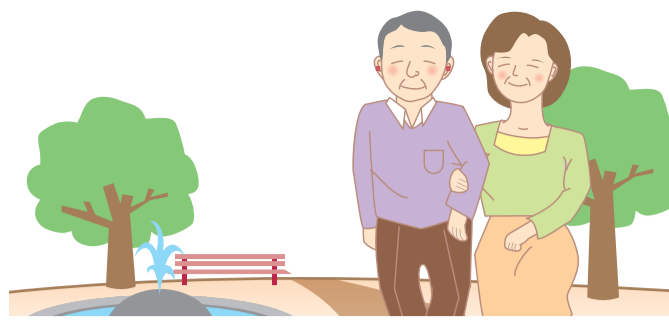


イヤートナー

1 準備

ご使用になる前に、電池を入れてください。
また、付属のイヤートナーのつけ心地を確認してください。


1. 電池を入れる

① 電池のシールをはがす
2~3分放置してください。

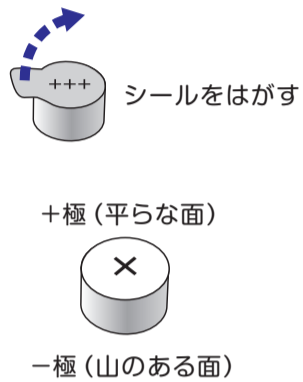


※空気電池は+極に空気中の酸素を取り入れる必要があります。


② 電池ケースを開く
Pioneerの文字面を下にしてください。

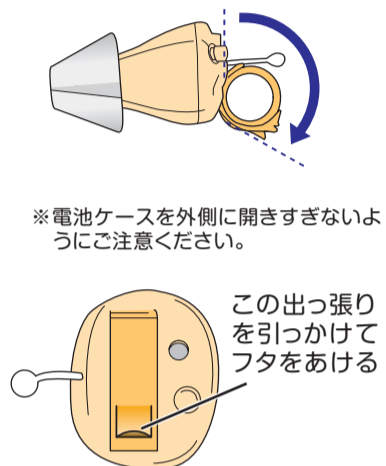

③ 電池ケースに電池を入れる
掃除ブラシを使って、+極(平らな面)を上に入れてください。

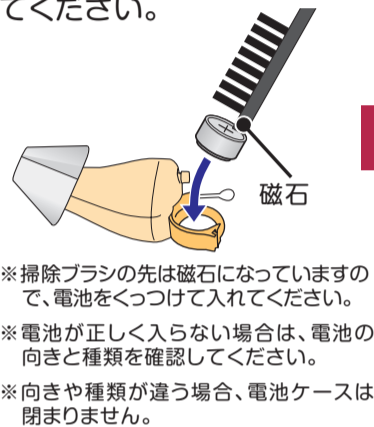


④ 電池ケースを閉じる
電池ケースを完全に閉めると電源が入ります。

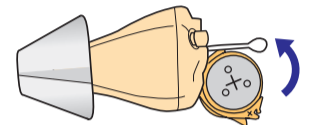

- ・電池は空気電池PR41/312を使用してください。
- ・電池寿命は連続使用で約165時間です。
- ・電池が消耗すると聞こえにくくなります。
- ・電池寿命は使用条件によって変わります。
- ・付属のお試し用電池は電池寿命が短い場合があります。
- ・電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。一度シールをはがした場合、使用しなくても電解液の劣化によって電池寿命は短くなります。一度シールをはがした空気電池は、使用しなくても約1ヶ月を目安に交換してください。
- ・長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。


2. イヤートナーを耳のサイズに合わせる

補聴器を、Pioneerの文字面が前を向くようにして、前方から後方へ少しねじりながら耳にピッタリと収まるまで押し込んでください。

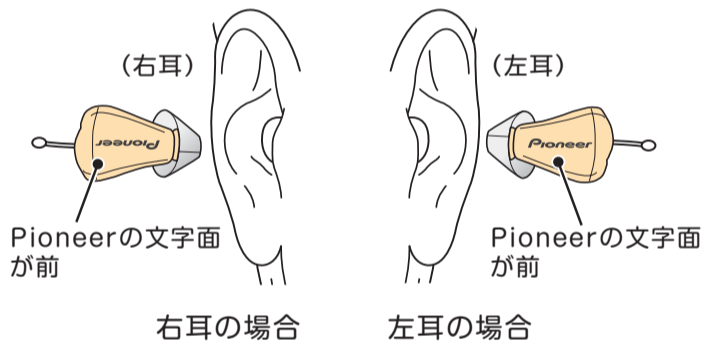


補聴器が耳あなに合わないと感じたときは...

次の項目「イヤートナーの交換方法」を参照し、好みのイヤートナーに交換してください。サイズは、S、M、フリーの3種類あります。

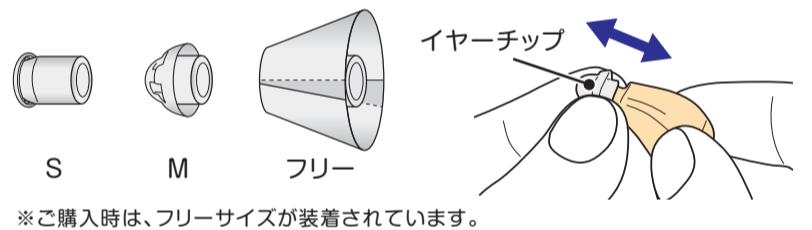


イヤートナーの交換方法

① イヤートナーをそのまま引っ張って外す

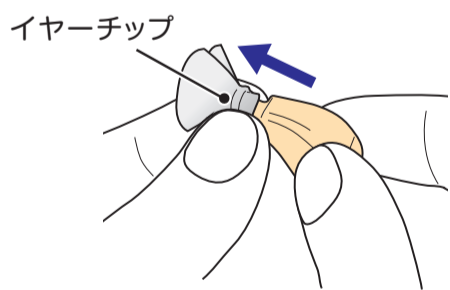

② 本体の先端にイヤートナーをはめる
奥までしっかりはめ込んでください。

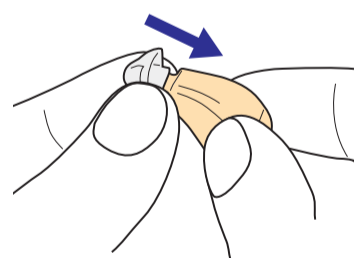

③ イヤートナーを軽く引っ張り、外れないことを確認する



本体とイヤートナーの間にすき間があかないようにします。


※イヤートナーが正しく取り付けられていないと、耳の中にイヤートナーが残ってしまうことがあります。このような場合は、ご自分では取り出さずに医師にご相談ください。
※イヤートナーは消耗品です。定期的に新しいイヤートナーに交換してください。(購入方法はサポートシートをご覧ください。)

2 使う

電源を入れて音量を選択してください。
使い終わったあとは、携帯ケースに入れて保管してください。

1. 電源を入れる


電池ケースを閉めると、自動的に電源が入ります。

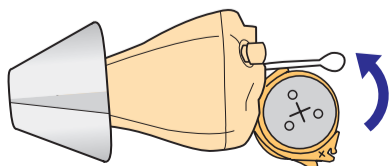

※電源を入れた直後の音量は、「音量4」(最大)です。

2. 補聴器を耳に入れる

補聴器を、Pioneerの文字面が前を向くようにして、前方から後方へ少しねじりながら耳にピッタリと収まるまで押し込んでください。

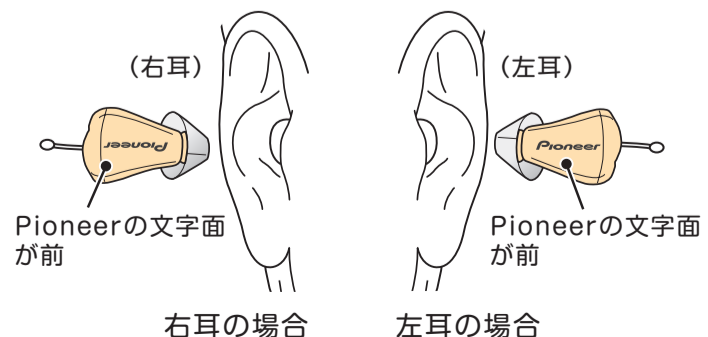


裏面へ続きます



3.音量を選択する

音量選択ボタンを押すたびに音量が4→3→2→1と下がります。音量が最小(音量1)になってから次にボタンを押した時は、最初(音量4)に戻ります。

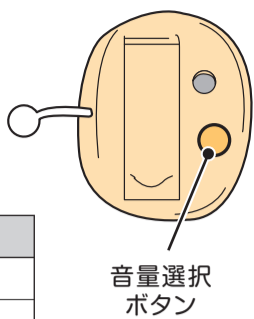


音量選択ボタン

音量	お知らせ音の鳴る回数
4	1回「ピッ」
3	2回「ピッ、ピッ」
2	3回「ピッ、ピッ、ピッ」
1	4回「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」

4.補聴器を外す


テグスおよび本体をつかみ、ゆっくり耳から引き出してください。

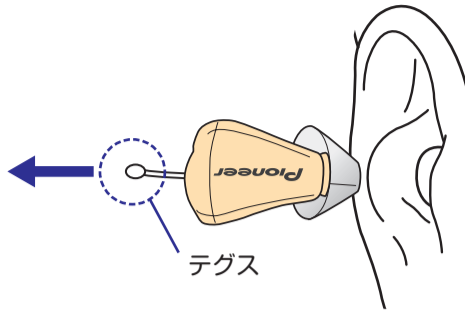

テグス

5.保管する

電池ケースを開けます。電池ケースを開けると電源が切れます。携帯ケースに入れて保管してください。

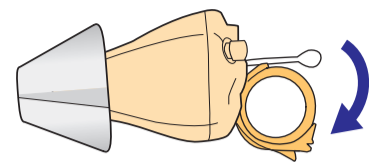

・電池の消耗を防ぐために電池の取り忘れにご注意ください。

③ お手入れ

いつも清潔にお使いください。また、付属品を交換する時は、下記に従って交換してください。

日頃のお手入れ


補聴器はいつも清潔にしておいてください。ご使用後は付属の掃除ブラシで耳あかを取り除き、ティッシュペーパーなどで油分や湿気を拭き取ってください。

■音の出口と入口のお手入れ

付属の掃除ブラシで耳あかなどを取り除いて、常に清潔にしておいてください。

音の入口のお手入れ

音の出口のお手入れ

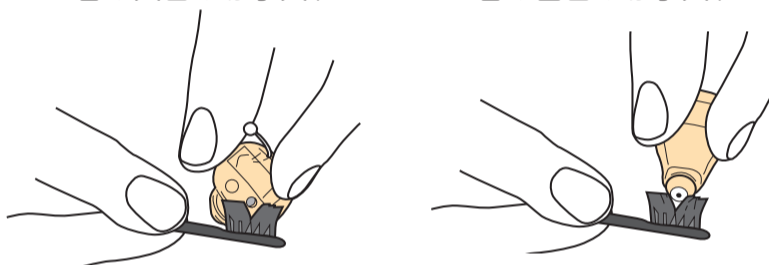

※必ず清掃面を下に向けて掃除してください。

■耳あかについて

ほんの少しの耳あかでも、補聴器の機能に影響を与えます。時々、耳鼻咽喉科を受診し、耳の中をきれいにしてもらってください。また、定期的に耳の検診を受けることをおすすめします。

■補聴器の保管について

補聴器はいつも乾燥した状態にしておいてください。長期保管するときには、電池を抜いてください。




禁止

- (1) 補聴器を水や他の液体に浸すことは、故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
- (2) シンナー、ベンジン、ベンゾールまたは濡れた布で拭くことは避けてください。


耳あかガードの交換方法

・耳あかガードは3か月に1度を目安にお取り替えください。


① イヤーチップを外す

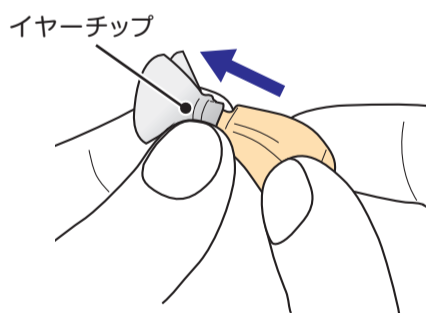

② ホルダーの取り外しフック側を、補聴器の耳あかガードに差し込む

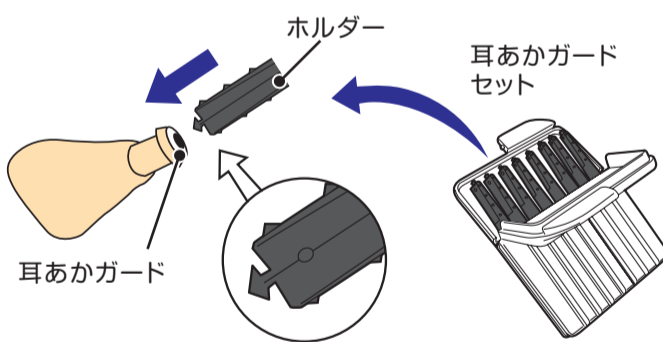


③ ホルダーを真っすぐ引き抜く ホルダーに使用済みの耳あかガードがくっついて外れます。

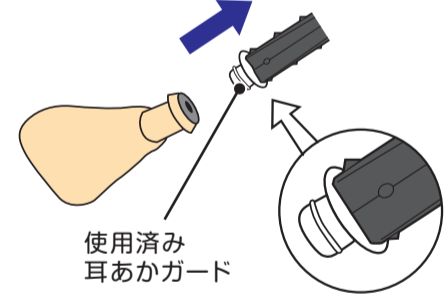


※部品番号:3122-150-75051



④ ホルダーをひっくり返し、新しい耳あかガードを補聴器に押し込む

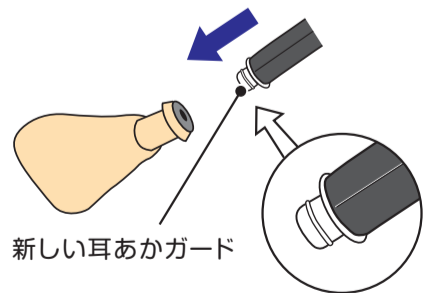

⑤ ホルダーを真っすぐ引き抜く 補聴器に新しい耳あかガードが装着されます。

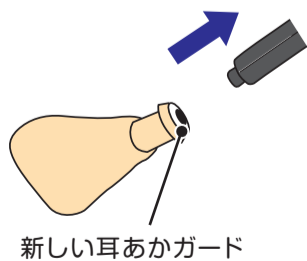

⑥ イヤーチップをはめる

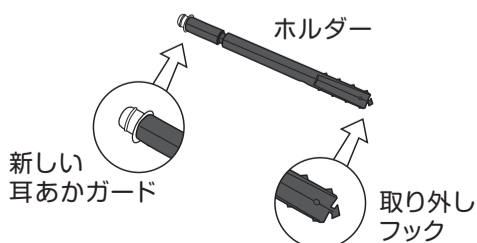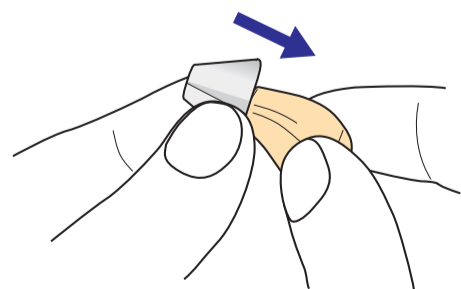

ホルダー

新しい耳あかガード

取り外しフック



禁止

一度利用した耳あかガードは再利用しないでください。脱落する危険性があります。



強制

補聴器をご使用になる前に、耳あかガードが正しく取り付けられているか確認してください。